





Resultados de Z Wave^{Pro} Tecnología de Pulso Radial

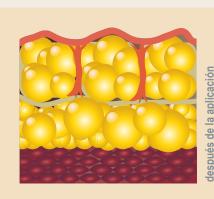


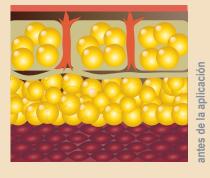








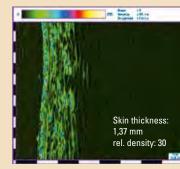

de la tecnología de pulso radial

20 MHz-Ultrasonido antes y después

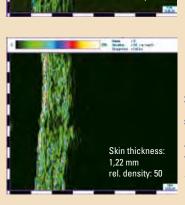

Z Wave^{Pro} – Espectro de aplicaciones

Indicaciones	Celulitis I	Celulitis II	Celulitis III 9
Número de sesiones	8 – 10	- 12	10 – 14
Aplicaciones por semana	2-3	2 – 3	2 – 3
Frecuencia	10 – 14	10 – 16 Hz	10 – 16 Hz
Nivel Potencia (I / II / III)	60 – 120 mJ	90 – 120 mJ	90 – 120 mJ
Pulsos Radiales por aplicación (por área)	2500 to 3000	2500 to 3400	3200 to 3700



La diferencia entre Z *Wave* ^{Pro} vs. masaje de manos

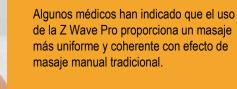


Foto cortesía de: Dr. John Shieh, South Pasadena, CA

Aplicación amigable para el paciente

La tecnología de Pulso Radial Z *Wave* ^{Pro} tiene la ventaja de:

- · tratamiento no invasivo
- · sin tiempos de inactividad.
- · aplicación sin dolor
- · aplicación sencilla
- · resultados visibles
- · versátil












Tratamiento Celulitis con Tecnología de Pulso Radial Z Wave^{Pro}

Liberación de pulso suave extendido:

- pieza de mano ergonómica con elevada masa de inercia suficiente para ofrecer una óptima transferencia de energía al paciente.
- · reduce la vibración para el personal clínico
- · pedal multidireccional
- las piezas de mano están garantizados para 2.000.000 de pulsos. Los dos incluyen piezas de mano deben producir aproximadamente 1.600 zonas de aplicación.

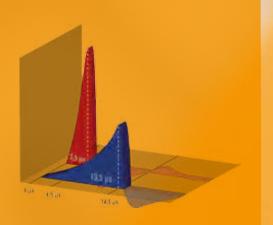

Mejorar la comodidad del paciente








El éxito de forma fácil

Z Wave ^{Pro} es intuitivo y fácil de manejar gracias a pantalla táctil a de color 12" y sus programas preestablecidos. Los programas pueden ser seleccionadas a través de la aplicación "aplication list". y están almacenados con la configuración recomendada, imágenes e información adicional. Hasta 240 programas pueden ser definidos y almacenado. La frecuencia y la energía puede establecerse a través de los dos controladores. Los parámetros se muestran claramente en la pantalla.

El generador de energía mecánica tiene una larga vida de servicio con precisión consistente. Actualizaciones, programa de almacenamiento y servicios se realizan a través de una tarjeta SD.

Gracias a sus dos piezas de mano, Z Wave Pro está listo para usar en cualquier momento. Su generador de pulsos, garantiza 2.000.000 (2 incluidos) corresponden a aproximadamente 1.600 zonas de aplicación

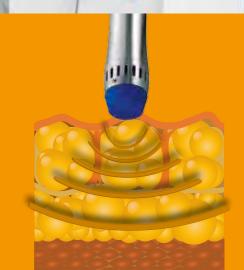



Datos Técnicos



Tecnología Compresor libre de pulso radial tecnología balística con generador electromagnético como proyectil acelerador,

1 - 22 Hz, 60 - 185 mJ

Programas 3 preajustes de campos de aplicación más las recomendaciones de aplicación detalladas

Unidad de Control pantalla táctil a color de 12" para todas las operaciones de software.

controladores ajustables de energía y frecuencia. funcionamiento de pieza de mano por pedal multi-direccional

Memoría y Actualización Tarjeta SD para menú de memoria,

programas adaptados y favoritos (240 lugares) / error log / actualización de firmware multi-direccional

Voltaje 100 - 240 V / 50/60 Hz; 220 V / 60 Hz.

Dimensiones monitor 9.25" 13,5" 12" 6 lbs (sin carro)

Garantía Limite de garantía 2 años en el sistema, y 2.000.000 de pulsos en cada pieza de mano

Zimmer MedizinSystems 25 Mauchly, Suite 300 Irvine, CA. 92618 800 327 3576 ofc 949 727 2154 fax info@zimmerusa.com www.zimmerusa.com

